

血液検体の送付方法

1. 検体を送付する際は必ず事前に、岐阜大学医学部附属病院検査部難病検査室への検査依頼が完了していることをご確認下さい。
2. 検体はEDTA2Na 容器にて5mL(小児の場合は3mLでも可)採血していただき、室温にて輸送してください。
3. 検体採取後は取り違い防止のため、採血管ラベル等にご施設名、患者氏名および発送年月日などを必ず記載してください。(写真1)
4. 採血管が割れないように、梱包用の緩衝材等で1本ずつ包装してください。(写真2)
5. 発泡スチロールの箱に入れ、梱包材や丸めた新聞紙等を利用して検体を固定してください。(写真3)
6. 宅配業者は、プラスカーゴサービスです。集荷依頼書を名古屋営業所に、回収予定日の前日午前中までにFAXにてお送り下さい。
7. 伝票の品名欄には『検体 血液』と明記してください。(写真4)
8. 土・日・祝日の到着を避け、回収翌日(地域によっては翌々日)の平日(できれば11:00まで)に到着するよう、週の前半での採血をご考慮願います。



写真1



写真2



写真3



写真4

○ 検体送付先

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1-1

岐阜大学科学研究基盤センターゲノム研究棟(難病検査室)

下澤 伸行 宛

TEL: 058-293-3171 E-mail: nanbyou@gifu-u.ac.jp